

PHILIPS AVENT "ISIS IQ UNO" – Pumpa za izmazanje mleka

Pre nego što upotrebite svoju pumpicu za izmazanje mleka po prvi put, kao i svaki naredni, morate oprati i sterilisati sve delove pumpe koji dolaze u direktan dodir sa majčinim mlekom. Pri tom se nikako ne smeju koristiti antibakterijska sredstva ili deterdženti jer mogu biti uzrok pucanja plastike.

Aventovi električni kao i mikrotalasni sterilizatori su specijalno dizajnirani da sve delove ISIS pumpice za izmazanje održavaju sterilnim unutar sebe u periodu od tri sata pod uslovom da se poklopac ne pomera.

Postupak sterilizacije možete izvršiti i otkuvavanjem u vodi u periodu od 10 minuta.

UPOZORENJE: Nikada ne prati i ne sterilisati kontrolnu ručku, pakovanje sa baterijom ili kabel sa utičnicom.

Način primene:

Da bi pokrenuli rad pumpe pritisnite i držite kontrolno dugme 2-3 sekunde. Svetlo na vrhu kontrolne drške će zasvetleti u narandžastoj boji, nakon čega će odmah signalizirati zelenim svetlom što ukazuje na to da je pumpica spremna za upotrebu.

Postavite pumpicu tako da se kontrolna ručka nalazi nasuprot Vas, tj. tako da prstom možete pritisnuti kontrolno dugme koje se nalazi na njoj.

Počnite sa stezanjem ručke i to 5 ili 6 puta prilično brzo simulirajući izmazanje koje ste obično osećali kada ste počinjali dojiti dete. Mleko će ubrzo početi da teče, nakon čega možete uspostaviti sporiji, prijatniji obrazac pumpanja. Kada ste uspostavili lagodan ritam pumpanja sa najmanje dva pritiska na ručku, jednostavno pritisnite kontrolno dugme na ručki nakon čega će ISIS IQ pumpica automatski nastaviti sa izmlazanjem mleka na potpuno isti način.

Svetlo na kontrolnoj ručki će više puta blicati zelenim svetlom. To znači da je vaš šablon, ritam izmazanja zapamćen u memoriji pumpe čak i nakon što se pumpa isključi.

Ukoliko iz bilo kog razloga želite da promenite ritam izmazanja, pritisnite kontrolno dugme ponovo i pumpa će se vratiti na manuelni princip rada. Svetlo će ponovo zasvetleti zelenom bojom i možete nastaviti sa pumpanjem sve dok opet ne pronađete prijatan ritam izmlazanja. Tada ponovo pritisnite kontrolno dugme i proces izmlazanja će se nastaviti u željenom ritmu.

Ukoliko proces izmazanja postane neprijatan ili želite da prestanete sa pumpanjem, pritisnite kontrolno dugme i odvojite prstima silikonski deo koji se nalazi između vaših grudi i tela pumpe.

Da bi ste obustavili rad pumpe, pritisnite i zadržite kontrolno dugme 2 sekunde sve dok se zeleno svetlo ne isključi. Tada možete izvući kabel iz utičnice na zidu.

Ukoliko zaboravite da isključite pumpu ona će to učiniti sama, automatski, nakon tri minute.

Vek trajanja baterija iznosi u proseku 6 sati. Svetlo na kontrolnoj ručki će zasvetleti crveno i upozoriti Vas da je vreme da se izvrši njihova zamena.

Vaša ISIS IQ UNO pumpa se može koristiti i kao manuelna pumpa. Ukoliko želite da je upotrebljavate na taj način, jednostavno zamenite kontrolnu ručku sa mehaničkom.

Za sve eventualne nedoumice pogledajte grafičko uputstvo koje se nalazi priloženo uz pumpicu u komercijalnom pakovanju.

